

優れた接着力を維持する

ポスト窩洞専用ライトガイド

ルーシーポスト

Luci Post

求めるのは
強固な接着力を生み出す
ライトガイド



◆ご存じですか？

光重合器の有効照射深度は、ライトガイド先端部から1mm離れることに5%位づつ重合が低下し、更に10mmで重合能力を失います。

◆「ルーシーポスト」を使えば

今まで届きにくかったポスト窩洞最深部への光照射が可能になります。

◆接着力を強化させます！

デュアルキュアボンディング処理時にルーシーポストを用いた光照射により、更に強固な接着を得ることができます。


50本入のみ

価格はディーラー様にご確認下さい

使用方法


1

マイクロブラシ（リバースポストブラシ、マイクロポストブラシ）等を用いて、根管窩洞清掃・セルフエッチング&デュアルキュアボンディング処理を行います。

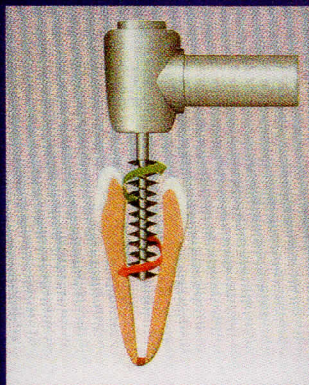

2

ポスト窩洞にルーシーポストを挿入し、光重合を十分に行ってください。以後の操作は通法に従い、支台築造等を行ってください。

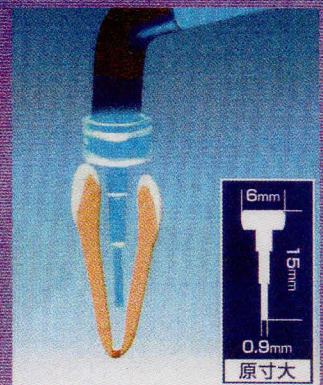

【注意】ルーシーポストはライトガイドであり、支台用ポストではございません。 ※価格及び規格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。