

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器 JMDNコード 70721000
一般医療機器 歯科材料加温器
カートリッジウォーマー

【形状・構造及び原理等】



形状 土台部 真鍮製 電熱線装備
カートリッジ収納部 アルミ材料 カートリッジ直立用
ホール形成
カバー部：プラスチック製

【使用目的又は効果】

歯科材料を定温で保存する装置

【使用方法等】

- 1 カートリッジ収納部ホールにカートリッジを直立させ、スイッチをオンにし定温でカートリッジを保存する。

【使用上の注意】

1. 本器のホール部にゴミ等がある場合、定温の保存が難しくなるため、常に清潔にする事。品は硬化後かなり硬いため、アンダーカットはブロックアウトの必要性があります。
2. 本器のカバーを装着していない場合、温度が低くなる可能性があるため、必ずプラスチックカバーを装着して使用する事。
3. 歯科医療有資格者以外は使用しない事。

【保管方法及び使用期間等】

「貯蔵・保管方法」

冷暗所に保管する事。
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、プラスチックカバー部のキズ等がないことを確認する事。

<定期点検>

清掃は、乾いた布又は湿った布等で本体を拭いて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：デンタルフォーラム
〒101-0021 東京都台東区浅草5丁目8番3号
Tel：03-6240-6158
外国製造業者：Saeyang Microtech Co LTD
国名：大韓民国