

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器

歯科咬合採得用材料

JMDNコード70883000

## フロンティア バイト



### 【形状・構造及び原理等】

形状（主成分）：カートリッジ内に充填されている、基材 硬化剤ペースト（二酸化ケイ素、シリコンビニール重合体、炭酸カルシウム、色素、その他）を練和し歯牙形状の印象を採得する。

### 【使用目的又は効果】

インレー クラウン ブリッジ 義歯などの、精密咬合採得印象に用いる。

### 【使用方法等】

- 1 カートリッジガンに本品を装着し、本品のキャップを外し必ず5mm程試し出しを行う。
- 2 先端にミキシングチップを装着する。必要に応じてオーラルチップをミキシングチップ先端に装着する。
- 3 練和開始後硬化が始まるので、その時間内に歯牙上に本剤を盛り上げ、中心咬合位で閉口させ、口腔内で30秒以上保持し、印象剤を取り出す。

### 【使用上の注意】

1. 本品は硬化後かなり硬いため、アンダーカットはブロックアウトの必要性があります。
2. 本品の硬化時間は大変短いため（30秒）、患者の閉口時中心咬合位に素早く閉口することを説明する
3. 印象を消毒する際には、2%グルタルアルデヒドで薬液消毒する
4. 本材が患者の目に入らないよう注意する。

### 【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

冷蔵庫若しくは23℃以下の冷暗所に保管する事。  
23℃以上の常温で保存した物は使用しない事。  
23℃以上で保管すると、極端に流動性が低下します。  
ミキシングチップ破折の原因になります。  
夏季や室温が高くなる場合は、必ず冷蔵庫保存をして下さい。  
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

{有効期限}

添付のJANコードシールに明記

### 【保守・点検に係わる事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ等がないか確認する事。

使用前は必ず射出口の汚れを確認し、あれば清掃して下さい

<定期点検>

清掃は、乾いた布又は湿った布等で本体を拭いて下さい。

### 【包装】

1箱

カートリッジ（ベース キャタリスト 計50ml）4本入り  
ミキシングチップは同包していません。

大箱 上記最小単位が、10箱詰め。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：デンタルフォーラム 田代明彦  
〒111-0032 東京都台東区浅草5丁目8番3号  
Tel：03-6240-6158

外国製造業者：Frontier Dental IND Co Ltd

国名：大韓民国