

機械器具49 医療用穿孔器、穿削器及び穿孔器 JMDNコード70575000
一般医療機器 フロンティアマンドレル



【形状・構造及び原理等】

軸部形状：JIS T5504-1軸部形式1(φ2.35mm CA用)
材質：真鍮、ニッケルメッキ

【使用目的、効能又は効果】

切削用のディスクやホイールを取り付ける回転心棒

【品目仕様等】

- 1 スクリュータイプ研削・研磨用
- 2 規格仕様 T5504-1軸部形式1(φ2.35mm CA用)14mm
- 3 歯科用コントラングルモーターに対して、簡便な着脱を確保する。
- 4 装着するブラシ カップ ディスク等の取り付け部分の規格的正确性を確保している
- 5 装着するブラシ カップ ディスク等と緩みを発生させない構造を確保している。

【操作方法又は使用方法等】

スクリュータイプ研削・研磨用ブラシ、カップ等をマンドレルに取り付け、歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し使用する。

【使用方法に関する注意事項】

- 1) ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め回転させて、振れ・抜けがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- ① 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- ② 消毒等行わず、他の患者には使用しないこと。
- ③ 本材は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本材は使用前に必ず消毒を行う事。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

洗浄、消毒、滅菌上の注意：

- ・ 次の薬剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。（次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン）
- ・ 薬液消毒を行なう時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ・ 使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・ 洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩化イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ・ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質又は変色することがある。
- ・ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- 1 本品は、滅菌ボックス等に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

【包装】

- 12 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名：デンタルフォーラム 田代 明彦
住所：〒101-0021
東京都台東区浅草5丁目8番3号
電話番号：03-6240-6158

外国製造元：フロンティアデンタル株式会社
大韓民国