

歯科材料 06 歯科用印象材料 JMDNコード 70887000

一般医療機器 歯科印象採得用器材  
**ミキシングガン ディスペンサー**



**【形状・構造及び原理等】**

**左側より**

印象採得用 ガン（印象材射出用）  
ディスペンサー（印象材射出用）  
カートリッジコネクター（カートリッジ内印象材移動用コネクター）

原材料  
ガン ディスペンサー 硬質プラスチック製  
カートリッジコネクター ポリプロピレン製

**【使用目的、効能又は効果】**

歯科印象採得時、印象材をカートリッジから押し出す  
（ガン・ディスペンサー）  
印象材の詰め替えに使用する（カートリッジコネクター）

**【品目仕様等】**

仕様  
本品の歯列部形状が、規定の規格で有る事。  
バリ等が出現していない事  
規定の口径で接続孔が仕上がっている事。

**【操作方法又は使用方法等】**

使用方法  
印象材カートリッジを装着し押し出すために使用する  
カートリッジどうしを接続し、印象材を移動させる。

**【使用上の注意】**

重要な基本的注意

- 1) 口角が乾燥しひび割れたような状態の場合、ワセリン等を塗布し適切な処置を講じる事。
- 2) 長時間消毒用薬液中に放置しない事

- ③ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- ④ 消毒等行わず、他の患者には使用しないこと。
- ⑤ 本材は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本材は使用前に必ず滅菌を行う事。
- ⑦ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【保守・点検に係わる事項】**

- 1 本品は、通常に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事
- 4 洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。
- 5 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）には使用しないこと。
- 6 洗浄、消毒後の本品は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となることがある。

**【包装】**

ミキシングガン 1個入り  
ディスペンサー 1個入り  
カートリッジコネクター 3個入り

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者氏名：デンタルフォーラム  
住所：〒111-0032  
東京都台東区浅草5丁目8番3号  
電話番号：03-6240-6158  
FAX番号：03-6240-6159  
外国製造元：フロンティアデンタル株式会社  
国名：大韓民国