

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDNコード 70887000
ミキシングガン ディスペンサー



【形状・構造及び原理等】

左側より

印象採得用 ガン（印象材射出用）

ディスペンサー（印象材射出用）

カートリッジコネクター（カートリッジ内印象材移動用コネクター）

原材料

ガン ディスペンサー 硬質プラスチック製

カートリッジコネクター ポリプロピレン製

【使用目的、効能又は効果】

歯科印象採得時、印象材をカートリッジから押し出す

（ガン・ディスペンサー）

印象材の詰め替えに使用する（カートリッジコネクター）

【品目仕様等】

仕様

本品の歯列部形状が、規定の規格で有る事。

バリ等が出現していない事

規定の口径で接続孔が仕上がっている事。

【操作方法又は使用方法等】

使用方法

印象材カートリッジを装着し押し出すために使用する

カートリッジどうしを接続し、印象材を移動させる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1) 口角が乾燥しひび割れたような状態の場合、ワセリン等を塗布し適切な処置を講じる事。

2) 長時間消毒用薬液中に放置しない事

③ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。

④ 消毒等行わず、他の患者には使用しないこと。

⑤ 本材は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

⑥ 本材は使用前に必ず滅菌を行う事。

⑦ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

1 本品は、通常に保管する事。

2 高温多湿の場所をさける事

3 薬液等かからない様に保存する事

4 洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。

5 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）には使用しないこと。

6 洗浄、消毒後の本品は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となることがある。

【包装】

ミキシングガン 1個入り

ディスペンサー 1個入り

カートリッジコネクター 3個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名：デンタルフォーラム

住所：〒111-0032

東京都台東区浅草5丁目8番3号

電話番号：03-6240-6158

外国製造元：SEIL GLOBAL Co LTD

原産国：大韓民国