


機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具 JMDNコード3586000  
一般医療機器 歯科印象材用シリンジ

## 寒天印象シリンジ

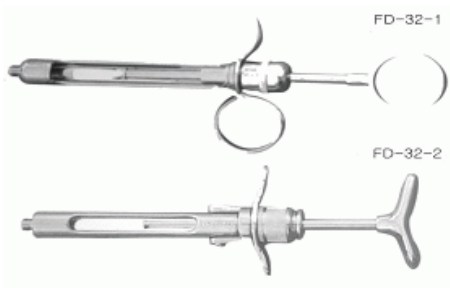

### 【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール製  
寒天カートリッジ後方挿入型  
二つ折れ型  
ノズル 3種類 直1種類 曲2種類

### 【使用目的、効能又は効果】

するために用いる。

### 【品目仕様等】

本品の先端部形状が、規定の規格で有る事。  
先端部の折れ曲がり、規定以内の強度を有する事。  
ハンドル部が規定内の誤差で製作されている事。  
ニードル取り付けネジがJ I S規格内である事。

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1) 寒天カートリッジ後部のゴムにアスピレータープランジヤーが確実に密着している事を確認の上使用する事
- 2) 長時間消毒用薬液中に放置しない事
- 3) シリンジ先端部ノズル針固定部に確実にねじ込み、ノズルのガタツキが無い事を確認した上で使用する。

### 【使用上の注意】

- ① 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは、使用しないこと。
- ② 消毒等行わず、他の患者には使用しないこと。
- ③ 本材は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本材は使用前に必ず消毒を行う事。
- ⑤ 本品の落下や無理な力を加えない事
- ⑥ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

- 1 本品は、滅菌ボックス等に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

### 【包装】

本体 1個  
ノズル 3本入 直 太1本 曲 太 細 各1本

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名: デンタルフォーラム 田代 明彦  
住所: 〒101-0021 東京都台東区浅草5丁目8番3号  
電話番号: 03-6240-6158

外国製造元: フロンティアデンタル株式会社  
大韓民国