


## ミキシングチップ II

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

本品は、一度使用したもの、血液や唾液に触れたものを再使用しないこと。

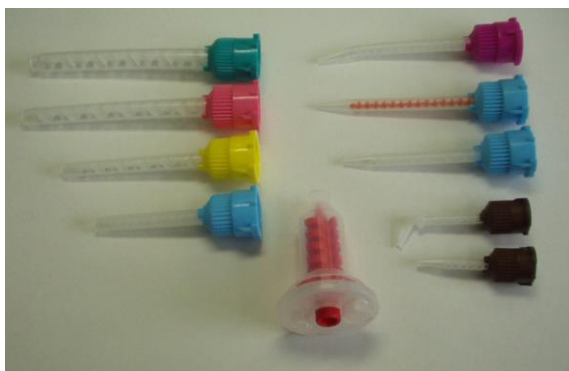

#### 【形状・構造及び原理等】

歯科印象材及びセメント並びに、レジンコア材の練成用チップ  
チップ内で基材と硬化剤が混和されチップ出口より射出される印象  
及びセメント並びに、レジンコア材が 規定時間内に硬化する構造

#### 【使用目的、効能又は効果】

カートリッジに充填されたシリコーン材料等の練成

#### 【効能又は効果に関する使用上の注意】

カートリッジ(新タイプ/タイプ2)に装着できるよう設計されています。旧タイプ(タイプ1)及びその他の規格のカートリッジには装着できませんので、ご注意ください。

#### 【品目仕様等】

JIS規格カートリッジに装着出来る形状及び  
規格を有した基材及び硬化剤の射出口を有する事  
カートリッジに装着した際、装着面からの漏れがない事

#### 【操作方法又は使用方法等】

[ 使用方法に関する使用上の注意 ]

- 1) カートリッジのキャップ取り外し  
カートリッジのキャップを反時計方向に45°回転させ、カートリッジに付与されたきざみ部とキャップの突起部を合せて引き抜きます。
- 2) ミキシングチップ取り付け準備  
練和紙上に少量のシリコーン又はレジンを出し、ベースとキャタリストが等量出ていることを確認します。(等量出ている場合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので注意して下さい。)
- 3) ミキシングチップの装着  
カートリッジに付与されたきざみ部とミキシングチップのジョイント部にあるアジャストポイントを合せて差し込み、時計方向へ90°回転させ、ミキシングチップを確実に装着します。
- 4) 抽出

ディスペンサーガンを操作し、材料等を抽出します。

- 5) ミキシングチップの取り外し  
ミキシングチップの装着と逆の方法で、ミキシングチップをカートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリコーン又はレジン、セメント等が逆流する場合がありますので、衣服などに付着させないように注意して下さい。)
- 6) キャップの取り付け  
カートリッジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップをカートリッジへ取り付けます。この際カートリッジの抽出孔にベース及びキャタリストが付着している場合は、ティッシュペーパーなどでふき取ってからキャップを装着して下さい。ベース及びキャタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、カートリッジ内でシリコーン及びレジン、セメント等が硬化することがありますので十分注意して下さい。

#### 【使用方法に関する使用上の注意】

- ①ミキシングチップは1患者1個の使用とし、他の患者への使いまわしはしないで下さい。
- ②ミキシングチップ内でシリコーン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガンを無理に操作しないで下さい。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損を起こすことがあります。
- ③使用後のミキシングチップは「破棄物に関する法律」に従い、適切に処理して下さい。

#### 【使用上の注意】

- ①本品は、【性能、使用目的、効能又は硬化】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②使用中に誤飲させないように注意すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

#### 【包装】

- ・ ミキシングチップII(グリーン) 50本入
- ・ ミキシングチップII(ピンク) 50本入
- ・ ミキシングチップII(イエロー) 50本入
- ・ ミキシングチップII(ブルー) 50本入
- ・ ミキシングチップII(コア用) 50本入
- ・ ミキシングチップII(レジンセメント)50本入
- ・ ミキシングチップII(マックスセム) 50本入
- ・ ミキシングチップII(ペンタミックス)50本入

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 : デンタルフォーラム  
住所 : 〒101-0021  
東京都台東区浅草5丁目8番3号  
電話番号 : 03-6240-6158

外国製造元 : Frontier dental IND 大韓民国