

機械器具 66 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード70682000

## ニューミキシングチップ



### 【形状・構造及び原理等】

歯科印象材及びセメント並びに、レジンコア材の練和用チップ  
チップ内で基材と硬化剤が混和され  
チップ出口より射出される印象材及びセメント並びに、  
レジンコア材が 規定時間内に硬化する構造

### 【使用目的、効能又は効果】

新タイプ(タイプ2)のカートリッジに充填されたシリコーン印象材  
及びレジン、セメント等の練和

### 〔効能又は効果に関する使用上の注意〕

カートリッジ(新タイプ/タイプ2)に装着できるよう設計されていま  
す。旧タイプ(タイプ1)及びその他の規格のカートリッジには装着で  
きませんので、ご注意ください。

### 【品目仕様等】

J I S規格カートリッジに装着出来る形状及び  
規格を有した基材及び硬化剤の射出口を有する事  
カートリッジに装着した際、装着面からの漏れがない事

### 【操作方法又は使用方法等】

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- 1) カートリッジのキャップ取り外し  
カートリッジのキャップを反時計方向に45°回転させ、カート  
リッジに付与されたきざみ部とキャップの突起部を合せて引き  
抜きます。
- 2) ミキシングチップ取り付け準備  
練和紙上に少量のシリコーン又はレジンを出し、ベースとキャ  
タリストが等量出ていることを確認します。(等量出ている場  
合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので  
注意して下さい。)
- 3) ミキシングチップの装着  
カートリッジに付与されたきざみ部とミキシングチップのジョ  
イント部にあるアジャストポイントを合せて差し込み、時計方  
向へ90°回転させ、ミキシングチップを確実に装着します。
- 4) 抽出  
ディスペンサーガンを操作し、シリコーン又はレジン、セメン

ト等を抽出します。

- 5) ミキシングチップの取り外し  
ミキシングチップの装着と逆の方法で、ミキシングチップをカ  
ートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリ  
コーン又はレジン、セメント等が逆流する場合がありますので、  
衣服などに付着させないように注意して下さい。)
- 6) キャップの取り付け  
カートリッジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップを  
カートリッジへ取り付けます。この際カートリッジの抽出孔に  
ベース及びカタリストが付着している場合は、ティッシュペ  
ーパーなどでふき取ってからキャップを装着して下さい。ベー  
ス及びカタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、  
カートリッジ内でシリコーン及びレジン、セメント等が硬化す  
ることがありますので十分注意して下さい。

### 【使用方法に関する使用上の注意】

- ①ミキシングチップは1患者1個の使用とし、他の患者への使いま  
わしはしないで下さい。
- ②ミキシングチップ内でシリコーン及びレジンが硬化した後にデ  
ィスペンサーガンを無理に操作しないで下さい。ディスペン  
サーガン及びカートリッジの破損を起こすことがあります。
- ③使用後のミキシングチップは「破棄物に関する法律」に従い、適  
切に処理して下さい。

### 【使用上の注意】

- ①本品は、【性能、使用目的、効能又は硬化】の項に記載された  
用途以外には使用しないこと。
- ②使用中に誤飲させないように注意すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管  
管理すること。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

### 【包装】

- ・ ミキシングチップ(グリーン) 80本入
- ・ ミキシングチップ(ピンク) 80本入
- ・ ミキシングチップ(イエロー) 80本入
- ・ ミキシングチップ(ブルー) 80本入
- ・ ミキシングチップ(コア用) 50本入
- ・ ミキシングチップ(レジンセメント) 50本入
- ・ ミキシングチップ(パンタミックス) 50本入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 : デンタルフォーラム 田代明彦  
住所 : 〒101-0021  
東京都台東区浅草5丁目8番3号  
電話番号 : 03-6240-6158  
外国製造元 : SEIL GLOBAL Co LTD  
原産国 : 大韓民国