


機械器具 65 歯科用充填器 JMDNコード70718000

一般医療機器 歯科用充填器

## オーラルチップ

### 再使用禁止

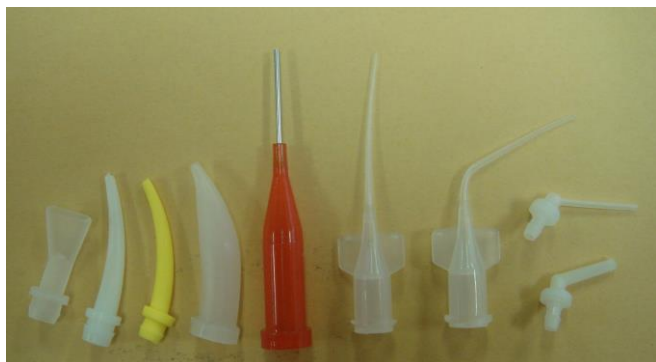

### 【形状・構造及び原理】

プラスチック製のノズルで、歯科用印象材 充填材の先端に取り付ける。  
ニードルが装着された物もある。

### 【使用目的、効能又は効果】

カートリッジに充填されたシリコーン印象材 及びレジンの充填の際に、ミキシングチップや充填機の先端に本品を装着し使用する

### 【品目仕様等】

ミキシングチップに装着した際、装着面からの漏れがない事  
ミキシングチップの装着口から、簡単に抜けない事  
印象材のフローを邪魔しない充分な射出口を持つ事  
充填機先端に装着した際には、エッジの破折に注意する事。  
〔効能又は効果に関する使用上の注意〕  
新タイプミキシングチップに装着できるよう設計されています。旧タイプには装着できませんので、ご注意ください。

### 【操作方法又は使用方法等】

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- 1) ミキシングチップの装着  
カートリッジに付与されたきざみ部とミキシングチップのジョイント部にあるアジャストポイントを合せて差し込み、時計方向へ45°回転させ、ミキシングチップを確実に装着します  
その後本品をミキシングチップ先端に装着します
- 2) 抽出  
ディスペンサーガン进行操作し、シリコーン又はレジンを抽出します。
- 3). オーラルチップの取り外し  
ミキシングチップの装着と逆の方法で、ミキシングチップをカートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリコーン又はレジンが逆流する場合がありますので、衣服などに付

着させないように注意して下さい。)

### 【使用方法に関する使用上の注意】

- ①オーラルチップは1患者1個の使用とし、他の患者への使いまわしはしないで下さい。
- ②ミキシングチップ内でシリコーン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガンを無理に操作しないで下さい。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損を起すことがあります。
- ③使用後のオーラルチップは「破棄物に関する法律」に従い、適切に処理して下さい。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ①本品は、【性能、使用目的、効能又は硬化】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②使用中に誤飲させないように注意すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

- 1 本品は、滅菌ボックス等に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

### 【包装】

- ・オーラルチップ(イエロー) SS 100本入
- ・オーラルチップ(ホワイト) S 100本入
- ・オーラルチップ(ミラクルチップ・アキュドース)  
A 100本入 白色
- ・オーラルチップ(ミラクルチップ・アキュドース)  
B 100本入 遮光型
- ・オーラルチップ(ミラクルチップ・ニードルチップ)  
C 100本入 20G付
- ・オーラルチップ(バイト用) 50本入
- ・オーラルチップ(アクセスチップ) 太 50本入
- ・オーラルチップ(アクセスチップ) 細 50本入
- ・オーラルチップ(キャピラリー)直 50本入り
- ・オーラルチップ(キャピラリー)曲 50本入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名：デンタルフォーラム  
住所：〒111-0032  
東京都台東区浅草5丁目8番3号  
電話番号：03-6240-6158  
FAX番号：03-5688-8841  
外国製造元：フロンティアデンタル株式会社 大韓民国