

歯科材料 09 歯科用研削材料 JMDNコード35768000
一般医療機器 **ポリシングブラシ**

再使用禁止



【形状・構造及び原理等】

軸部形状；コントラアングルハンドピース用 Φ2.35mm
原材料 ブラシ ポリアミド
軸受け部 真鍮軸部形状：T5504-1軸部形式1(φ2.35mm)
ニッケルメッキ

【使用目的、効能又は効果】

歯面の清掃に用いる。

【品目仕様等】

- 1 歯科予防治療用ブラシとして、装着機器のネジ精度に対応しきる精度を有すること
- 2 歯面に付着した歯垢を有効に除去できる形状を有すること
- 3 使用機器に於いて回転させて使用する為、十分なワイヤー耐久力を有すること
- 4 歯科医師、衛生士等が歯面清掃に用いる際に、十分な耐久力を有すること

【操作方法又は使用方法等】

ハンドピースに装着し、使用する。
スクリュータイプに於いては、マンドレル等を介する

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) 800回転を超えた使用の場合には、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転（800回転以下）を厳守すること。
- 2) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 空隙があきらかに狭いと思われる場合は、無理に挿入することにより、歯肉へ影響を与えることがあるため、事前に確認すること。
- 2) 歯間部は800回転を超えた使用の場合には、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転（800回転以下）を厳守すること。

矯正部位に於いては、1500回転以下で使用する事。

- 3) 使用する際には、口腔内での離脱を防ぐため、反時計回り（左回り）になっていないか、使用前に確認すること。
- 4) PMTC専用コントラに装着する際には、最後までねじ込み、ねじ込みが止まったことを確認したうえで使用すること。
- 5) マンドレルを使用する場合は、本品を確実に固定し、半チャックでないこと・ぶれがないかを確認すること。
- 6) 本品は曲げた状態で使用せず、使用中も曲がらないよう注意すること。
- 7) 曲がった状態で使用した場合、破損もしくは歯肉を傷つける恐れがあるため、速やかに形状をもとに戻すこと。
- 8) 使用中、不要な力を加えると破損する恐れがあるため、使用中の力のコントロールには充分配慮すること。（歯面に触れさせる程度）
- 9) 口腔内で折れた際には、誤飲する恐れがあるため、充分気をつけること。
- 10) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- 11) 一人の患者以外には使用しないこと。（再使用不可）
- 12) 本品は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 13) 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- 1 本品は、滅菌ボックス等に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

【包装】

ポリシングブラシ	72本入
SPポリシングブラシ	36本入
CBポリシングブラシ	36本入
キャンドルブラシ	36本入
スケーリングブラシ	72本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名：デンタルフォーラム
住所：〒111-0032
東京都台東区浅草5丁目8番3号
電話番号：03-6240-6158
FAX番号：03-6240-6159
外国製造元：フロンティアデンタル株式会社
大韓民国