

歯科材料 06 歯科咬合採得用材料 JMDNコード70883000  
一般医療機器 **スマートジルバイト**



### 【形状・構造及び原理等】

形状(主成分)：ペースト(二酸化ケイ素、シリコンビニール重合体、炭酸カルシウム、色素、その他)

### 【使用目的、効能又は効果】

インレー クラウン ブリッジ 義歯などの精密咬合採得印象に用いる。

### 【品目仕様等】

練和開始後25～30秒で硬化が始まること  
口腔内に築盛り閉口してから40秒以内で硬化すること

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1 カートリッジガンに本品を装着し、本品のキャップを外し必ず5mm程試し出しを行う。
- 2 先端にミキシングチップを装着する。必要に応じてオーラルチップをミキシングチップ先端に装着する。
- 3 連和物を目的の部位に盛り上げ、患者に中心咬合位で咬合させる。
- 4 口腔内で30秒以上保持し、印象剤を取り出す。

### 【使用方法に関する使用上の注意】

1. 本品は硬化後かなり硬いため、アンダーカットはブロックアウトの必要性があります。
2. 本品の硬化時間は大変短いため(30秒)、患者の閉口時中心咬合位に素早く閉口することを説明する
3. 印象を消毒する際には、2%グルタルアルデヒドで薬液消毒する
4. 本材が患者の目に入らないよう注意する。
5. 歯科医療有資格者以外は使用しない事。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 「貯蔵・保管方法」

冷蔵庫若しくは23℃以下の冷暗所に保管する事。  
23℃以上の常温で保存した物は使用しない事。  
23℃以上で保管すると、極端に流動性が低下します。  
ミキシングチップ破折の原因になります。  
夏季や室温が高くなる場合は、必ず冷蔵庫保存して下さい。  
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

#### 「有効期限」

添付のJANコードシールの日付より、2年間

### 【保守・点検に係わる事項】

#### 使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ等がないか確認する事。

使用前は必ず射出口の汚れを確認し、あれば清掃して下さい  
<定期点検>

清掃は、乾いた布又は湿った布等で本体を拭いて下さい。

### 【包装】

1箱  
カートリッジ (ベース キャタリスト 計50ml) 2本  
ミキシングチップ 5本

大箱 上記最小単位が、25箱詰め。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：デンタルフォーラム

〒101-0021 東京都台東区浅草5丁目8番3号

Tel：03-6240-6158

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co LTD

国名：大韓民国