

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 医療用嘴管 JMDNコード70317000
サージカル サクションチップ



【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール製

【使用目的、効能又は効果】

外科用バキュームチップ
口腔内浸出液、唾液、血液等の吸引に用いる。

【品目仕様等】

本品の先頭部形状が、規定の規格で有る事。
先頭部の湾曲部が、規定以内の強度を有する事。
バキューム装着部が規定内の誤差で製作されている事。
普通使用時に、バキュームより抜け出し、脱落しない事

【操作方法又は使用方法等】

本品の落下や無理な力を加えない事

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) ユニット装備のバキュームホースに装着し使用する際、白衣等で引っ掛けないように注意する事
- 2) 長時間消毒用薬液中に放置しない事
- 3) 2.5mm口径のチップは口腔内異物を吸引した際、目詰まりを起す事が有るので大きな物は吸引をしない事
- 4) バキュームチップ内の清掃は特に使用後入念に行う事

【使用上の注意】

- ① 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- ② 消毒等行わず、他の患者には使用しないこと。
- ③ 本材は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本材は使用前に必ず消毒を行う事。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- 1 本品は、滅菌ボックス等に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

【包装】

10本入（セット） 1本入り（バラ）
ステンレス カラーコーティング
2.5mm 2.5mm
3.0mm 3.0mm
4.0MM 4.0mm
レギュラー
6.0mm 6.0mm（シリコンチップ付）
以上8種類

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名：デンタルフォーラム 田代 明彦
住所：〒101-0021
東京都台東区浅草5丁目8番3号
電話番号：03-6240-6158

外国製造元：フロンティアデンタル株式会社
大韓民国